

# Nadelwechsel

Die Nadel ist **unmittelbar vor jeder Injektion zu wechseln**. Bitte führen Sie vor jeder Insulininjektion einen Sicherheitstest durch.

## Neue Nadel

- Sehr dünn
- Fein geschliffen
- Silikon-Gleitschicht (verändert sich nach jedem Einstich)



## Gebrauchte Nadel

- Widerhakenbildung
- Abstumpfung
- **Folge:** Verletzungen und Verhärtungen im Fettgewebe

## Folgende Probleme können durch den *mehrmaligen Gebrauch* von Nadeln entstehen:

- Widerhakenbildung, Abnutzung der Silikon-Gleitschicht (= höheres Schmerzempfinden)
- Veränderung des Unterhautfettgewebes (Bildung von Lipodystrophien) – dadurch kann sich die Insulinaufnahmedauer verändern
- Luftblasenbildung in der Patrone wird durch Abnehmen der Nadel nach der Injektion vermieden
- Infektionsgefahr durch mehrmaligen Gebrauch von nicht sterilen Nadeln

### Haben Sie Fragen zu Diabetes?

Wir haben Antworten, die in Ihr Leben passen: Insuline, Pens und intelligente Blutzuckermessgeräte.

Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da – rund um die Uhr.

Ihr *ServiceCenter* Diabetes

**0800 52 52 010**

(gebührenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)  
[servicecenter-diabetes@sanofi.com](mailto:servicecenter-diabetes@sanofi.com)

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter [diabetes.sanofi.de](http://diabetes.sanofi.de)

Ein Service von

**sanofi**