

Встановлення дози на
вашому Doublestar™
здійснюється
з кроком в 2 одиниці.

**Інструкція з
використання
шприц-ручки
Doublestar™ 300 од./мл**



Додаткову інформацію ви можете
знайти за посиланням diabetes.sanofi.de




sanofi

Інструкція з використання шприц-ручки Doublestar™

Це скорочена інструкція з використання Doublestar™ 300 од./мл.

Ознайомтеся з інструкцією із застосування, що міститься в кожній упаковці Doublestar™ 300 од./мл.

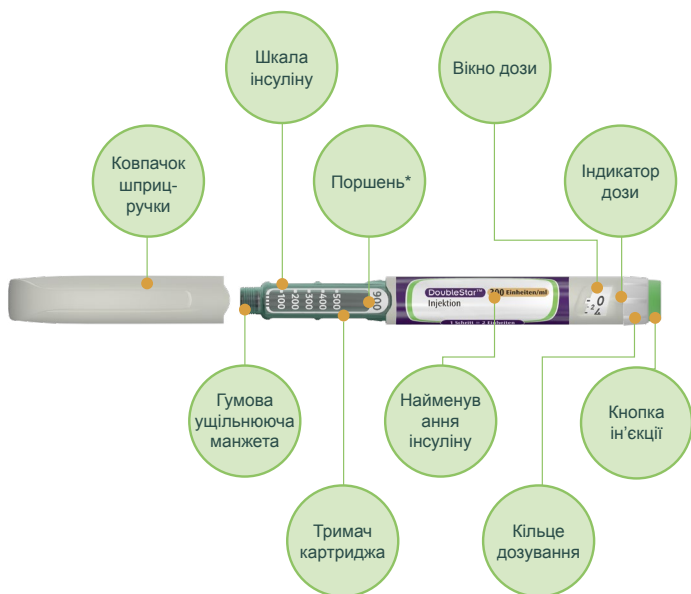

* Ви зможете побачити поршень лише після того, як введете кілька доз.

1 Перевірте свою шприц-ручку

Вийміть з холодильника **нову шприц-ручку** щонайменше **за годину** до першої ін'єкції.

Ін'єкції холодного інсуліну викликають більш болісні відчуття.

1
годину
до першого
застосування



Переконайтеся, що у вас є **правильний інсулін**. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте інші шприц-ручки.

Ніколи не використовуйте шприц-ручку після завершення терміну придатності.

Зніміть ковпачок зі шприц-ручки. Переконайтеся, що розчин інсуліну прозорий.




Не використовуйте шприц-ручку, якщо інсулін каламутний, змінив колір або містить частинки.




2 Приєднайте нову голку

Для кожної ін'єкції використовуйте нову стерильну голку. Це допоможе запобігти закупорюванню голки, її забрудненню та інфікуванню.

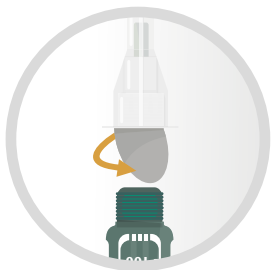

Візьміть нову голку та зніміть захисну плівку.

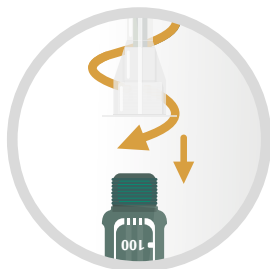

Тримайте голку під прямим кутом і накрутіть її на шприц-ручку так, щоб вона щільно трималася. Не перетягуйте різьблення.

Зніміть зовнішній захисний ковпачок голки. Залиште його для подальшого використання. Зніміть внутрішній захисний ковпачок голки та утилізуйте його.

Будьте обережні при поводженні з голками, щоб уникнути уколів та передачі інфекційних захворювань.

3 Виконайте тест на безпеку


Перед кожною ін'єкцією виконайте **тест на безпеку**, тобто:

- переконайтеся, що шприц-ручка та голка функціонують правильно;
- переконайтеся, що ви отримуєте правильну дозу інсуліну.



Встановіть 4 одиниці, повертаючи кільце дозування, доки індикатор дози не опиниться на позначці «4».

Повністю натисніть на кнопку ін'єкції. Якщо інсулін виходить з кінчика голки, це означає, що ваша шприц-ручка функціонує правильно.

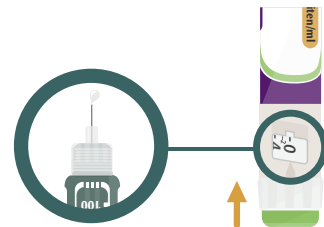

ЯКЩО ІНСУЛІН НЕ ВИХОДИТЬ:

6x

Можливо, вам доведеться повторити цей крок до шести разів, доки не почне виходити інсулін.


Якщо інсулін не виходить, можливо, голка закупорена. У цьому випадку замініть голку, а потім повторіть тест на безпеку.

Не використовуйте шприц-ручку, якщо інсулін, як і раніше, не виходить з кінчика голки. Використайте нову шприц-ручку.


4

Встановіть дозу

Ваша шприц-ручка містить 900 одиниць інсуліну. Ви можете встановити дози від 2 до 160 одиниць з кроком 2 одиниці.

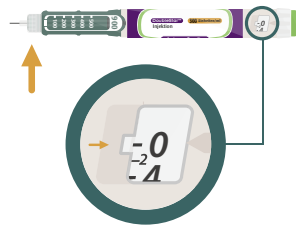

Переконайтеся, що голка приєднана, а доза встановлена на «0».

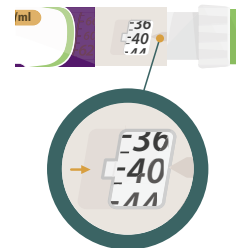

Встановіть дозу, перемістивши індикатор дози на потрібну позначку у вікні дози. Кожна позначка відповідає 2 одиницям.

Приклад встановленої
дози: 40 одиниць


Завжди перевіряйте число у вікні дози, щоб переконаватися, що ви встановили правильну дозу.

5 Введіть дозу

Якщо ви повернули занадто далеко, ви можете повернути кільце дозування назад.

Якщо у вашій шприц-ручці залишилося недостатньо одиниць для вашої дози, кільце дозатора зупиниться на кількості одиниць, що залишилася.

Якщо інсуліну у шприц-ручці недостатньо і ви не можете повністю встановити дозу, або розділіть дозу на дві ін'єкції, або використайте нову шприц-ручку.

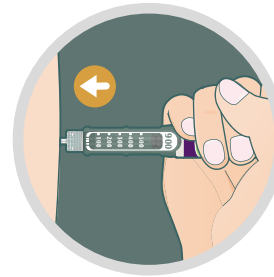


Введіть голку в шкіру так, як показав лікар, фармацевт або медичний працівник.

Не торкайтеся кнопки ін'єкції.

Покладіть великий палець на кнопку ін'єкції. Потім **повністю натисніть на кнопку ін'єкції** та утримуйте її в натиснутому положенні.

Утримуйте натиснутою кнопку ін'єкції й, коли у вікні дози з'явиться «0», повільно порахуйте до 5.

Потім витягніть голку зі шкіри.

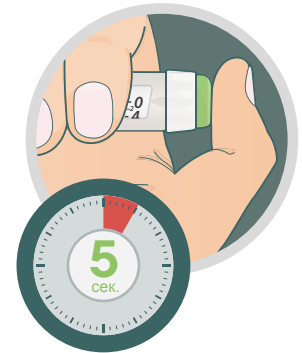


Ніколи не встановлюйте дозу та не натискайте на кнопку ін'єкції, якщо не прикріплена голка. Це може призвести до пошкодження шприц-ручки.

Якщо важко натиснути на кнопку, не застосовуйте силу. Замініть голку, а потім повторіть тест на безпеку. Якщо кнопка, як і раніше, натискається з великим зусиллям, візьміть нову шприц-ручку.

6

Видалення голки

Ніколи не зберігайте шприц-ручку зі встановленою голкою.

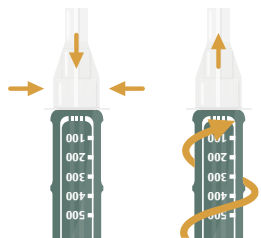

Надіньте зовнішній захисний ковпачок голки на голку і за допомогою нього викрутіть голку зі шприц-ручки.
Утилізуйте використану голку в контейнері із захистом від проколів.



Знову надіньте ковпачок на шприц-ручку.

Дотримуйтесь рекомендованих запобіжних заходів при видаленні та утилізації голки, щоб уникнути ризику травмування від уколу голкою та можливої передачі інфекційних захворювань.

Голки та зберігання

Використовуйте лише голки виробництва компаній Becton Dickinson and Company (BD), Ypsomed, Artsana або Owen Mumford.

Не використовуйте шприц-ручку **довше 6 тижнів** після першого застосування.



ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

Зберігайте невикористані шприц-ручки в холодильнику при температурі від 2 °C до 8 °C.

Не заморозувати.


ПІСЛЯ ПЕРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Зберігайте шприц-ручку при кімнатній температурі **нижче 30 °C**.

Ніколи не кладіть шприц-ручку назад у холодильник.

Ніколи не зберігайте шприц-ручку зі встановленою голкою.

Завжди зберігайте шприц-ручку з надітим ковпачком.

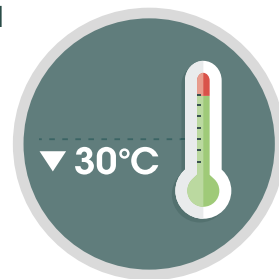

Ін'єкція за 6 кроків за допомогою Doublestar™

1. Перевірити шприц-ручку
2. Приєднати голку
3. Провести тест на безпеку
4. Встановити дозу
5. Ввести дозу
6. Видалити голку

Ваш центр обслуговування
пацієнтів з діабетом

0800 52 52 010

(безкоштовно зі стаціонарних та
мобільних телефонів Німеччини)

servicecenter-diabetes@sanofi.com

